




TENA 킴포트 일지형



◆ 이런점이 좋습니다.

1. 그물망 팬티를 착용하고 그 안에 일지형 기저귀를 함께 사용하기 때문에 **통기성이 탁월** 합니다.
2. **쾌속 흡수 특수 커버**를 사용하여 다시 배어 나오지 않도록 합니다.
3. 초강력 흡수제를 첨가하여 최대 **450cc까지** 소변을 흡수할 수 있습니다.
4. **샘 방지 막**을 부착하여 옆으로 소변이 새는 것을 막아줍니다.
5. **인체공학적** 디자인을 사용하여 착용시 불편감을 최소화하여 줍니다.
6. **교체 알림선**이 있어 적절한 교체시기를 한눈으로 확인할 수 있습니다.
7. **알로에 성분**이 첨가되어 피부를 편안하고 부드럽게 하는 보습 효과가 있습니다.
8. 그물망 팬티는 30회이상 세탁하여 재사용할 수 있어 **경제적**입니다.

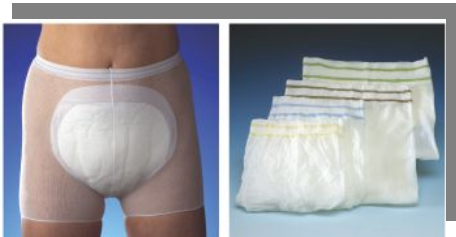

※ 착용과 관련된 동영상은 www.tena.co.kr에서 자세히 확인할 수 있습니다.




김포트+픽스 - 착용법



1. 픽스는 바느질 솔기가 바깥쪽으로 오도록 입으십시오. (앞,뒤 구별은 없음)
2. 컴포트를 편다음 세로로 반을 접어 주십시오.



3. 작고 둥근부분이 앞쪽, 넓은쪽이 엉덩이 부분으로 하여 다리사이에 넣고 위치를 잡아줍니다.

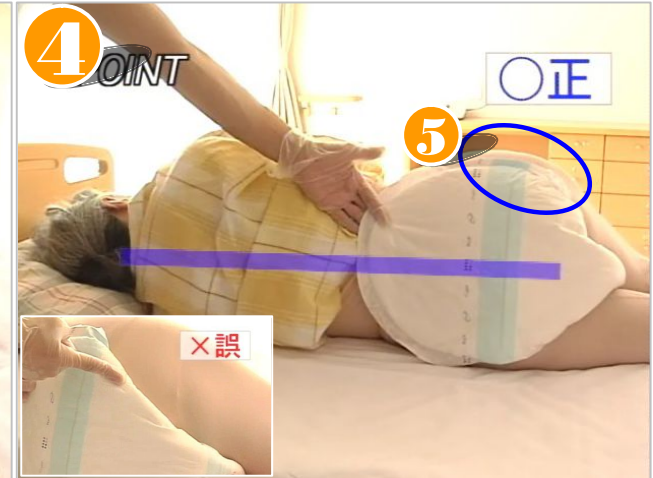

4. 엉덩이 뒷쪽을 척추중앙에 잘 맞춥니다.
5. 가장자리를 평평하게 정리합니다.



6. 한손으로 기저귀를 고정하고 다른 손으로 픽스를 입힙니다.(뒤쪽)



7. 컴포트 아래쪽에 작은 틈이라도 생기면 소변이 새 수 있습니다. 새지 않게 하려면 컴포트가 사타구니 사이에서 꼭 맞아야만 합니다(앞쪽)



8. 피부의 마찰방지를 위해 아랫부분의 픽스를 알맞게 조절하여 픽스의 가장자리 아랫부분이 기저귀를 고정하도록 정리 합니다.